




## Wurzelstifte setzen mit dem D.T. Light-Post System\* A. Stiftbett und D.T. Light-Post vorbereiten

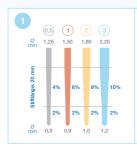



Stiftgröße anhand anatomischer Gegebenheiten, Röntgenaufnahmen und Zahnschema bestimmen.



Insertionstiefe festlegen.











kürzen. Mit Alkohol reinigen.

## B. Adhäsive Befestigung







Mit Adhäsiv/Self Cure Activator-Gemisch benetzen, sanft verblasen.







Stumpfaufbau aus Kompositzement erstellen.\* Faserstift vollständig bedecken.

Gebrauchsarweisungen der D.T. Light-Posts u der adhäsiven Befestigungsmaterialien beacht



Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel oder auf www.vdw-dental.com.

M.T.D. (RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES) 3 Rue Louis Néel, Technoparc, Espace Gavanière 38120 Saint-Égrève Frankreich Tel.:+33 4 76 56 56 66

info@rtd.fr

Vertrieb durch:

VDW GmbH

Bayerwaldstr. 15 81737 München Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 62734-0 Fax: +49 (0) 89 62734-304 info@vdw-dental.com

