

# Backfill

2

Kurzanleitung **BeeFill®**

**Warnhinweis:**  
Berühren Sie die Lippen, das Zahnfleisch oder die Mundschleimhaut nicht mit der warmen Kanüle oder dem Handstück!



- 1** Wählen Sie einen passenden Handpluggler aus. Positionieren Sie die Spitze der heißen Kanüle gegen das zuvor komprimierte Füllmaterial. Drücken Sie auf die abgeflachte Seite des Sensorrings am Handstück zur Aktivierung des Füllvorgangs.



- 2** Es gibt eine kurze Verzögerung, bis der Mikromotor die warme Guttapercha bis zur Spitze der Kanüle geschoben hat. Lassen Sie einige Millimeter des erwärmten Materials in den Kanal fließen.



- 3** Benutzen Sie den zuvor angepaßten Handpluggler, um die erwärmte, injizierte Guttapercha an diese Region des Kanals anzupassen. Während der Abkühlung das Material 5 Sek. verdichten.



- 4** Setzen Sie die Spitze der heißen Kanüle wiederum auf das gerade abgefüllte Material auf.



- 5** Aktivieren Sie den Sensorring und füllen wiederum einige Millimeter Guttapercha in den Wurzelkanal.



Fahren Sie mit der Obturation in der beschriebenen Weise fort, bis der Wurzel komplett gefüllt ist, oder stoppen Sie an einem Punkt um einen Wurzelstift zu setzen.


- 6** Wählen Sie einen größeren Handpluggler, und drücken Sie sein Arbeitsende ringsherum in den Kanal, um ihn dreidimensional zu formen und das Füllmaterial fest einzupassen.

# Downpack

## 1 Kurzanleitung *BeeFill® Pack*



1 Spülung des aufbereiteten WK.

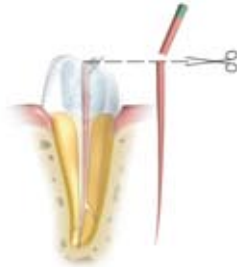

2 Anpassen des Masterpoints bis 0,2-0,5mm vor Arbeitslänge. Kontrolle der richtigen Länge durch Röntgenaufnahme.



3 Vollständige Trocknung des WK.




4 Anpassen des ersten Pluggers 3-5 mm vor Arbeitslänge. Stopper platzieren.



5 Benetzung des gekürzten Masterpoints mit Sealer und Einführung in den Kanal bis auf Arbeitslänge.



6 Den Masterpoint bis auf 5mm vor dem Apex mit dem erhitzten Plugger abtrennen. Guttapercharesten entfernen.

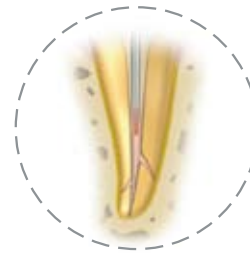

7 Masterpoint bis zum Apex thermoplastisch erweichen (2-3 Sek.). Spitze abkühlen lassen, 5 Sek. komprimieren. Plugger 1 Sek. erhitzen und entfernen.



8 Downpack so weit abschließen, dass der Wurzelkanal für die folgenden Schritte des Backfill vorbereitet ist.