




D.T. Light-Posts – spezielle Double Taper Form

Anwendung
Schritt für
Schritt

Wurzelstifte setzen mit dem D.T. Light-Post System*

A. Stiftbett und D.T. Light-Post vorbereiten

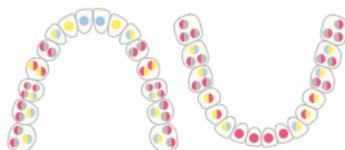

Stiftgröße anhand anatomischer Gegebenheiten, Röntgenaufnahmen und Zahnschema bestimmen.



B. Adhäsive Befestigung

8

Optional



Kanal und koronales Dentin
ätzen, spülen, trocknen.*

9



Empfohlenes
Produkt:
Prime&Bond active®
und Self Cure
Activator
von Dentsply Sirona

Adhäsiv und Self Cure Activator zu gleichen
Teilen mischen, Gemisch aufbringen, mind.
20 Sek. lang einwirken lassen und Über-
schüsse entfernen. Vorsichtig verblasen.*

10



Mit Adhäsiv/Self Cure
Activator-Gemisch be-
netzen, sanft verblasen.

11



Empfohlenes
Produkt:
core-X® flow
von Dentsply
Sirona

Kompositzement in Kanal
einbringen.

12



D.T. Light-Post platzieren,
stabilisieren und lichterhärten.*

13



Stumpfaufbau aus Komposit-
zement erstellen.* Faserstift
vollständig bedecken.

*Gebrauchsanweisungen der D.T. Light-Posts und
der adhäsiven Befestigungsmaterialien beachten!



Endo
Easy
Efficient

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachhandel oder auf www.vdw-dental.com.

 R.T.D. (RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES)
3 Rue Louis Néel, Technoparc, Espace Gavanière
38120 Saint-Égrève
Frankreich
Tel.: +33 4 76 56 56 66
Fax +33 4 76 56 11 77
info@rtd.fr

Vertrieb durch:

VDW GmbH
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Deutschland
Tel.: +49 (0) 89 62734-0
Fax: +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com

