

Spülprotokoll

Alkohol	96%
EDTA	17%
NaCl	0,9%
NaOCl	1-5,25%
Zitronensäure	15-40%



Spülprotokoll mit Unterstützung von Dr. Christoph Zirkel, Endospezialist in Köln

Die Eddy Familie von VDW bietet die hochwertige Kombination aus einem Spül- und einem Aktivierungsinstrument für das komplette Spül- & Desinfektionsangebot.


EDDY® Schallaktivierte Spülspitze

- Spülspitze aus weichem Polyamid, die über einen Aircaler in hoher Frequenz angetrieben wird
- 3D-Bewegung zur Aktivierung der Spüllösung
- genauso effektiv wie ultraschallbasierte Spitzen



EDDY FLEX.CANNULA™ Spülkanüle

- aus flexiblem Polypropylen mit zwei seitlichen, gegenüberliegenden Öffnungen
- Luer Lock
- biegsam und flexibel
- schonend und effizient, atraumatisch für die Zahnhartsubstanz

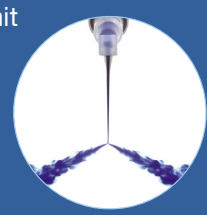



Unter den folgenden Rufnummern erreichen Sie unseren Service kostenlos:

Deutschland: 0800 839 3368
Österreich: 00800 839 3368 0
International: +49 (0) 89 62734-555

 **VDW GmbH**
Bayerwaldstraße 15
81737 München
Tel. +49 (0) 89 62734-0
Fax +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com