

FileCare® EDTA Chelator

Bessere Wurzelkanal-Behandlungsergebnisse

→ Warum FileCare® EDTA ?

Die Schmierschicht (smear layer) wird entfernt


Bessere tubuläre Penetration

endodontischer Medikamente und Füllmittel,
da Dentintubuli geöffnet werden

Verhindert das Verklemmen der Feilen im Kanal

Reduziert Instrumentenfrakturen

FileCare® EDTA wirkt als Gleitmittel und verringert den
Reibungswiderstand für die Instrumente zusätzlich durch
Anweichen des Dentins

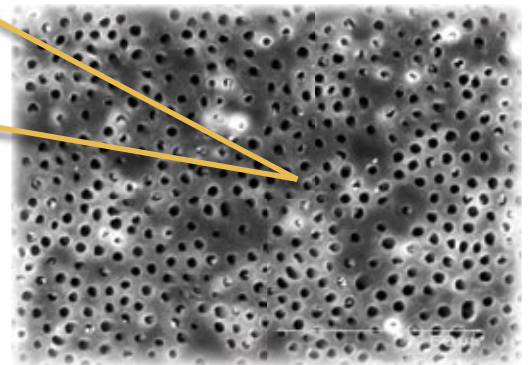

Erleichtertes Vordringen der Instrumente,
denn FileCare® EDTA wirkt in kalzifizierten Kanälen als
Komplexbildner für Kalziumsalze

Aktives Ausschwemmen von
Pulpengewebe und Dentinspänen

durch Aufschäumen bei Kontakt von
FileCare® EDTA mit NaOCl

Antibakterielle Wirkung

von EDTA und Ureaperoxid

Mehr als nur ein Gleitmittel



FileCare® EDTA

FileCare® EDTA ist ein feilenschonender Chelator für die effektive Reinigung und leichtere Ausformung des Wurzelkanals während der Aufbereitung

Einfache Anwendung



Geben Sie FileCare® EDTA aus der Spritze in ein Dappenglas oder auf einen Anmischblock.
Nehmen Sie das Gel mit einem Endo-Instrument (z.B. FlexMaster® oder Handfeile)
auf und bringen es in den Wurzelkanal ein.

Die Wirkstoffe von FileCare® EDTA

15% EDTA

10% Ureaperoxid in Gelform

Ref. 1010 000 002 Packung mit 2 Spritzen je 3ml

Ref. 1010 000 005 Packung mit 5 Spritzen je 3ml



VW000127 Rev. 0/3.12.2002